

# COSMOS ALCOHOLTESTER

## *Alco-Connect*<sup>®</sup> 6020 plus ■ ■ ■

### Kurzanleitung / Short manual



#### Gerät einschalten | *Switching on the unit*



Taste ca. 1 Sekunde drücken.  
*Hold button pressed for about 1 second.*



Bei abgelaufener Kalibrierung muss das Gerät durch Cosmos bzw. durch geschultes Personal gewartet werden.

*If the calibration has expired, the device must be serviced by Cosmos or by trained personal.*

#### Aktive Messung starten | *Start the active measurement*



Mundstück aufstecken und kontinuierlich in das Gerät einblasen\*.  
*Attach the mouthpiece and blow continuously into the device\*.*

- \* Einblasfehler: Automatischer Neustart, Messung wiederholen.
- \* Blow-in error: automatic restart, repeat measurement.

#### Passive Messung starten | *Start the passive measurement*



Taste drücken um direkt in den passiven Messmodus zu wechseln.  
*Press the button to change directly to passive measurement mode.*

#### Messergebnis ablesen | *Read measurement result*



Das Messergebnis wird in der eingestellten Einheit (%o, mg/l, ...) angezeigt.  
*The measurement result is given in the set value (%o, mg/l, etc.).*

#### Neue Messung starten | *Start new measurement*



Messergebnis bestätigen und Mundstück wechseln.  
*Confirm measurement result and replace mouthpiece.*

#### Gerät ausschalten | *Switching of the unit*



Taste ca. 3 Sekunden drücken  
*Hold button pressed for about 3 seconds.*

Weitere Informationen zur Bedienung siehe Hilfe Menü oder Bedienungsanleitung.  
*For further information on operation refer to the Help menu or operating manual.*

C A 6020 9 GA Alle Sprachen / Kurzanleitung D-GB



#### Cosmos-Alkoholtester GmbH

Am Ihlsee 18 · D-23795 Bad Segeberg  
cosmos@alcoholtester.de · www.cosmos-alcoholtester.de  
Tel.: +49-(0)-4551-83838 · Fax: +49-(0)-4551-87171